


Benutzerhandbuch

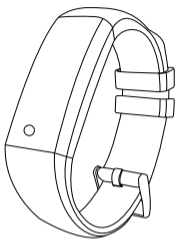

Technische Daten

- TFT-Farbbildschirm 0,96" 64x128 Pixel
- CPU: nFR52832
- Bluetooth: 4,0 BLE
- Herzfrequenz-Messgerät
- Tensiometer
- Schrittzähler
- Beschleunigungsmesser
- Nachrichtenbenachrichtigung
- Batterie: 105 mAh
- Batterie im Standby-Modus: bis zu 15 Tage
- Batterie im normalen Gebrauch: bis zu 6-8 Tage
- Ladezeit: 2 Stunden
- IP67 spritzwassergeschützt
- Material: PVC und Silikon




2 App: Wear Health

Um den HRB-400 vollständig zu genießen, scannen Sie den QR-Code Ihres Smartphones. Laden Sie dann die App herunter und installieren Sie sie



2.1 Sync


Aktivieren Sie nach der Installation der App Bluetooth auf Ihrem Smartphone. Öffnen Sie dann die App und klicken Sie auf das Benutzersymbol und dann auf den im Bild angezeigten Synchronizer. Nach der Synchronisierung können Sie die auf Ihrem HRB-400 erfassten Daten an Ihr Telefon senden, um Ihre tägliche Nachverfolgung durchzuführen.

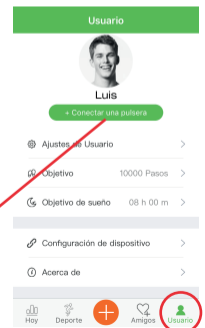

Sync

2.2 Modi

Um von einem Modus zum anderen zu wechseln, klicken Sie einfach auf die Menüsymbole. Einige Modi haben mehrere Untermenüs. Um von einem zum anderen zu gelangen, fahren Sie einfach mit dem Finger über den Bildschirm.

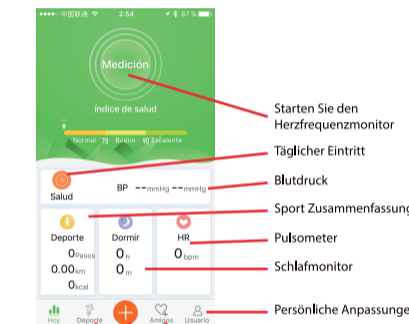

Zusammenfassung


GPS / Layout

Andere Optionen

Freunde

HINWEIS: Der Synchronisationsprozess erfordert, dass eine Mindestmenge an Informationen aufgezeichnet wurde, beispielsweise eine angemessene Anzahl von Schritten. Genauso mit dem Schlafmonitor.

Starten Sie den Herzfrequenzmonitor
Täglicher Eintritt
Blutdruck
Sport Zusammenfassung
Pulsometer
Schlafmonitor
Persönliche Anpassungen

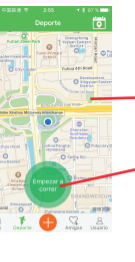

Reisekarte

Start

Sucher


Freundesfinder



HRB-400 verwendet eine interne Software zur Berechnung mehrerer Werte, so dass diese von einer professionellen medizinischen Messung abweichen können. Die durch diese Schaltfläche angezeigten Werte sind Richtwerte.

3 Modi in HRB-400

Drücken Sie die Taste auf dem Bildschirm Ihres HRB-400, um zwischen den verschiedenen verfügbaren Modi zu wechseln.

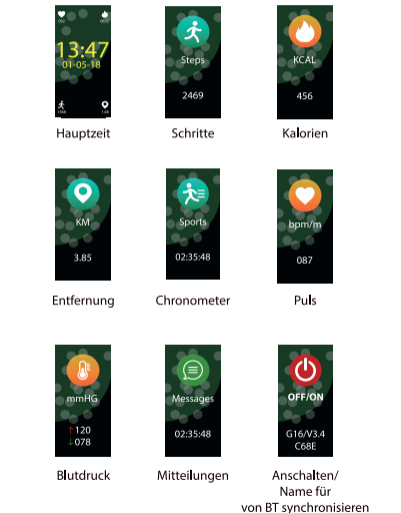

4. Aufladen

Um Ihren HRB-400 aufzuladen, verbinden Sie das Ladegerät so, dass die beiden Ladestifte die Metallanschlüsse des Armbandes berühren



5. FAQs

1. Ich kann nicht richtig synchronisieren

Stellen Sie sicher, dass kein anderes Gerät über Bluetooth mit Ihrem Telefon verbunden ist. Wenn im Bluetooth-Browser mehrere Geräte angezeigt werden, bei denen es sich möglicherweise um Ihren HRB-400 handeln kann, navigieren Sie bitte zwischen den Bildschirmen des Armbandmenüs, bis Sie die MAC-Adresse des Armbandes finden. Dies ist der Name, der auf Ihrem Telefon angezeigt werden sollte und ein eindeutiges HRB-400-Gerät identifiziert. Bei einigen Telefonen muss die Synchronisierung über die Bluetooth-Einstellungen des Telefons selbst und nicht über die App erfolgen.

2. Die Daten werden nicht synchronisiert

Das HRB-400-Armband verfügt über ein "Margin of Error"-System, um Fehlmessungen zu vermeiden. Wenn Sie keine ausreichende Datenmenge erreicht haben, können Sie die Informationen nicht an Ihr Telefon senden.

3. Ich denke, dass die Messung nicht korrekt ist

Das Armband HRB-400 umfasst einen Herzfrequenzsensor, einen Schrittzähler, ein Tensiometer und andere Messgeräte, die mit einer Software arbeiten, die die zum Zeitpunkt der Messung aufgezeichneten Daten interpretiert.

Abhängig von der Physiognomie jeder Person sind diese Messungen möglicherweise nicht vollständig genau, da das Armband HRB-400 kein medizinisches Messgerät ist. Die erhaltenen Daten sind orientiert und dienen dazu, dass jeder Benutzer eine globale Sicht auf seinen physischen Zustand hat.

4. Laden Sie nicht auf


Stellen Sie sicher, dass die Ladegerätklemmen die Metallplatten des Armbandes berühren. Stellen Sie außerdem sicher, dass das USB-Kabel des Ladegeräts richtig mit einem USB-Anschluss verbunden ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie uns.

5. Die App funktioniert nach dem letzten Update nicht richtig

Smartek ist nicht der Entwickler der Wear Health-App. Unser Armband HRB-400 ist mit der von einem Drittanbieter entwickelten App kompatibel, da wir nicht garantieren können, dass alle Funktionen der App immer korrekt funktionieren. Wenn Sie ein Problem gefunden haben, wenden Sie sich bitte an uns, um technische Unterstützung zu erhalten

6. Aktivieren Sie Benachrichtigungen

Sie können entscheiden, welche Anwendungen Sie erhalten möchten. Standardmäßig sind Benachrichtigungen deaktiviert. Um sie zu aktivieren, gehen Sie zu Benutzereinstellungen > Geräteeinstellungen > Sonstige Benachrichtigungen. Hier können Sie die Benachrichtigungen aktivieren oder deaktivieren, die Sie erhalten möchten.

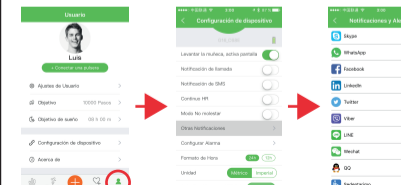

Konformitätserklärung

SMARTEK

Adresse: Ronda de Atocha 37, 28012 Madrid

Wir erklären unter unserer ausschließlichen Verantwortung die Konformität des Produkts HRB-400, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den Bestimmungen CE RED 2014/53 / EU und RoHS 2011/65 / EU der Europäischen Union.

www.smartek.es
Technischer Service: sac@smartek.es

