


Manual de Uso

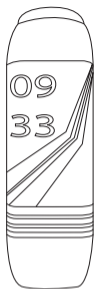

Características Técnicas

- Chip: DA14585
- Funciona con: Android 4.4, IOS8.2 y superiores
- Memoria: 128K+16M
- Pantalla: 0.96 TFT 160*80
- Bluetooth: BT4.0
- Batería: 105mAh
- Pulsómetro
- Tensiómetro

2 App: Wear Health


Para disfrutar al máximo de tu HRB-700 escanea el código QR correspondiente a tu Smartphone. A continuación descarga e instala la app



Tras escanear este QR aparecerán 3 opciones: iOS, Android y Android sin base Google. Por favor, descarga el correspondiente a tu teléfono móvil.

2.1 Sincronización

Tras instalar la app activa el Bluetooth en tu smartphone. A continuación abre la app y pulsa sobre el icono de Equipo y después al sincronizador que se muestra en la imagen. Tras la sincronización ya podrás enviar los datos recogidos en tu HRB-700 a tu teléfono para hacer tu seguimiento diario.


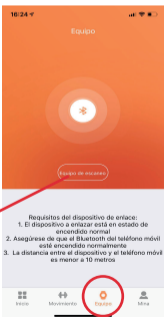


Sincronizar

1. El dispositivo a sincronizar está en estado de encendido normal
2. Asegúrese de que el Bluetooth del teléfono móvil está encendido normalmente
3. La distancia entre el dispositivo y el teléfono móvil es menor a 10 metros

2.2 Modos

Para cambiar de un modo a otro simplemente pulsa sobre los iconos del menú. Algunos modos tienen varios submenús; para pasar de uno a otro simplemente desliza el dedo por la pantalla.

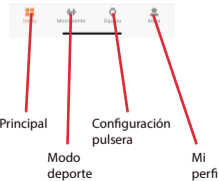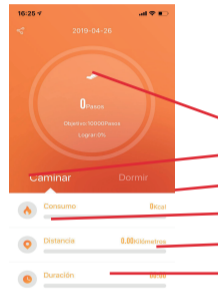

Recuento

Modo podómetro

Modo sueño

Calorías

Distancia

Tiempo

Principal

Modo deporte

Configuración pulsera

Mi perfil

NOTA: El proceso de sincronización requiere de haber registrado un mínimo de información, por ejemplo haber dado una cantidad razonable de pasos. Del mismo modo con el monitor del sueño.




Resumen

Modo deporte

Mapa de recorrido

Objetivo


Conectar con gestor de salud

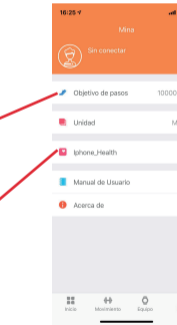

HRB-700 utiliza un software interno para el cálculo de varios valores, por lo que podrían diferir de una medición médica profesional. Los valores mostrados por esta pulsera son orientativos.


3 Modos en HRB-700

Pulsa el botón táctil de la pantalla de tu HRB-700 para pasar entre los distintos modos de los que dispone.

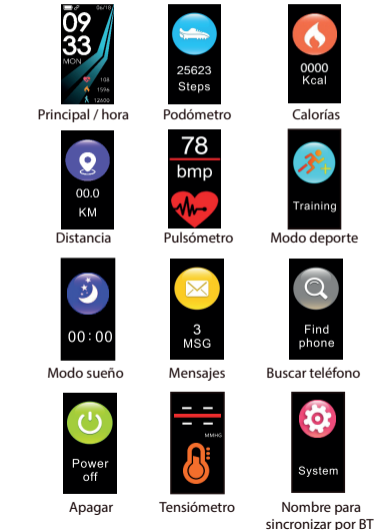

4. Carga

Para cargar tu HRB-700 Conecta el cargador ajustando los bornes de carga en el cargador de tal forma que hagan contacto. Después conecta el conector USB en un puerto USB libre de su ordenador o toma de corriente.

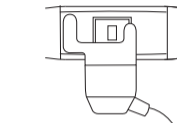

5. FAQs

1. No consigo sincronizar correctamente

Por favor, asegúrese que no hay otro dispositivo conectado por Bluetooth a su teléfono. Si en buscador de Bluetooth aparecen varios dispositivos que podrían ser su HRB-700, por favor, navegue entre las pantallas del menú de su pulsera hasta encontrar la que identifica el MAC de la pulsera. Este es el nombre que deberá aparecer en su teléfono e identifica un dispositivo único de HRB-700. En algunos teléfonos la sincronización deberá hacerse desde los ajustes de Bluetooth del propio teléfono y no desde la app.

2. No sincroniza los datos

La pulsera HRB-700 cuenta con un sistema de "margen de error" para evitar las mediciones en falso. Hasta no haber alcanzado una cantidad razonable de datos la pulsera no permite enviar la información a su teléfono.

3. Creo que la medición no es correcta

La pulsera HRB-700 incorpora un pulsómetro, podómetro, tensiómetro y demás medidores que funcionan mediante un software que interpreta los datos registrados en el momento de la medición.

Dependiendo de la fisonomía de cada persona estas mediciones pueden no ser completamente exactas puesto que la pulsera HRB-700 no es un medidor con fines médicos. Los datos obtenidos son orientativos y sirven para que cada usuario pueda tener una visión global de su estado físico.

4. No carga


Por favor, asegúrese que los bornes del cargador están tocando con los platos metálicos de la pulsera. También compruebe que el cable USB del cargador se encuentra correctamente insertado en un puerto USB con energía. Si el problema persiste contacte con nosotros.

5. La app no funciona correctamente tras la última actualización

Smartek no es el desarrollador de la app Wear Health. Nuestra pulsera HRB-700 es compatible con la app desarrollada por un tercero, porque lo que no podemos asegurar que todas las funcionalidades de la app funcionen correctamente todo el tiempo. Si ha encontrado algún tipo de problema, por favor, contacte con nosotros para obtener un soporte técnico

6. Activar notificaciones

Usted puede decidir las notificaciones de qué aplicaciones desea recibir. Por defecto, las notificaciones están desactivadas; para activarlas, por favor vaya a Equipo > Notificación de mensaje. Aquí podrá activar o desactivar las notificaciones que desea recibir.

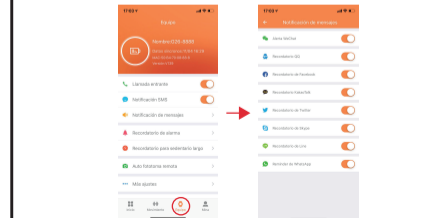

Declaración de conformidad

SMARTEK

Dirección: Ronda de Atocha 37, 28012 Madrid

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto HRB-700 al que se refiere esta declaración, con las normativas CE RED 2014/53/EU y RoHS 2011/65/EU de la Unión Europea.

www.smartek.es

Servicio Técnico: sac@smartek.es

